

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ПАКЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Если вы кормящая мама или в вашей семье есть младенец, то наверняка поднимался вопрос о необходимости хранения грудного молока, особенно, когда у работающей женщины нет возможности постоянно находиться рядом с ребенком. Пакеты для грудного молока сохраняют содержимое без изменения качественного состава, ведь грудное молоко – богатейший источник витаминов и питательных веществ. Благодаря специальным пакетам молоко можно транспортировать, замораживать и подогревать. Могут использоваться «молочными мамами» и донорами молока.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАКЕТОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЛИ МОЛОКА

- гигиеничность;**
- компактность;**
- возможность подогрева, заморозки;**
- простое использование.**

1. Прозрачные пакеты для молока объёмом 250 мл имеют градуировку: вы точно будете знать остаточное количество и сможете рассчитать запас.
2. Возможность маркировки с указанием точной даты сцеживания позволит контролировать свежесть порции.
3. Можно использовать вместе с молокоотсосом.
4. Пакеты для хранения молока выполнены из прочного полипропилена.
5. Не содержат Бисфенол-А.
6. Двойная Zip-застежка предупреждает проливание. Обеспечивает длительный срок службы, многократное открытие и закрытие пакета.
7. При хранении молока в холодильнике пакеты для детского питания сохраняют его качество в течение недели.
8. При замораживании содержимого срок годности увеличится до 3 месяцев.
9. Пакеты не требуют дополнительной стерилизации перед использованием.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Благодаря гигиеничным и простым в использовании пакетам для грудного молока сцеженное молоко можно удобно хранить, переносить и разогревать.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМЛЕНИЯ СЦЕЖЕННЫМ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ

Если вы кормите грудью и сцеживаете для малыша молоко, могут возникнуть ситуации, когда понадобится сохранить это молоко и использовать его позднее. Например, если вы работаете полный день, собираетесь в гости или просто хотите иметь запас сцеженного молока, чтобы кто-то другой мог покормить ребенка в ваше отсутствие. Кроме того, если у вас избыток грудного молока, лучше безопасно хранить эти излишки, чем выбрасывать, ведь сцеженное грудное молоко сохраняет практически все целебные свойства, поэтому оно полезнее для ребенка, чем молочная смесь.

КАК ХРАНИТЬ ГРУДНОЕ МОЛОКО: УДОБНОЕ И ГИГИЕНИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Если вы сцеживаете молоко непосредственно в бутылочки, целесообразно переливать его в пакеты для хранения и транспортировки. Их можно ставить вертикально для удобства использования, а можно запечатывать и класть горизонтально в холодильник или морозильную камеру. Пакеты для хранения грудного молока помогут и в дальнейшем, когда понадобится разморозить и разогреть молоко, чтобы покормить ребенка.

СПОКОЙСТВИЕ В ДОРОГЕ

Не стоит беспокоиться о том, что молоко протечет: каждый пакет для молока имеет двойную застежку, а швы надежно запаяны, что исключает любое протекание, разрыв или трещины. Сцеженное грудное молоко остается безопасным при комнатной температуре в течение четырех часов, но если возникает необходимость взять его с собой на более длительное время (до 8 часов), положите пакеты с молоком в сумку-холодильник с охлаждающим элементом.

ГИГИЕНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАКЕТОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА

Чтобы обеспечить безопасность сцеженного грудного молока для малыша, очень важно соблюдать правила гигиены. Прежде чем прикоснуться к пакету для хранения молока, тщательно вымойте руки пригодной для питья водой с мылом и высушите их чистым полотенцем или одноразовыми бумажными салфетками. Старайтесь не прикасаться к внутренней поверхности пакета.

1



2



3



МОЕМ РУКИ ПРАВИЛЬНО

4



5



6



В целях гигиены пакеты для грудного молока рассчитаны только на одно применение. Не используйте пакеты повторно, так как это может привести к перекрестному заражению.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СЦЕЖЕННОГО ГРУДНОГО МОЛОКА

Пакеты для грудного молока идеально подходят для его замораживания, так как они устойчивы к температурам морозильной камеры, готовы к использованию и легко маркируются — просто укажите дату в специальном поле на лицевой стороне пакета.




Помните, что как и все жидкости, грудное молоко расширяется при замораживании, поэтому не заполняйте пакеты выше отметки 180 мл. Благодаря плоской форме пакеты для грудного молока легко размещаются в морозильной камере и быстро размораживаются.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА

Чтобы сохранить все витамины, минералы и другие полезные компоненты грудного молока, всегда размораживайте пакеты с молоком в холодильнике. Это занимает около восьми часов, так что учитывайте этот фактор при подготовке к кормлению. Не пытайтесь ускорить размораживание путем разогрева пакета в микроволновой печи или емкости с кипящей водой, поскольку при таком способе в молоке могут образоваться горячие участки и обжечь ребенка.

КАК РАЗОГРЕВАТЬ ГРУДНОЕ МОЛОКО

Скорее всего, малышу понравится сцеженное молоко температуры тела, потому что оно больше похоже на молоко, поступающее непосредственно из груди. Разогреть молоко в пакете для хранения очень просто: поместите его в емкость с теплой водой или подержите под краном с теплой водой (не выше 37 °С, что соответствует температуре тела).

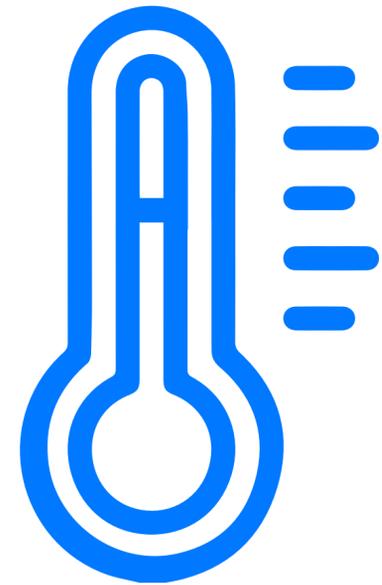

ВНИМАНИЕ!

- Предназначены только для одноразового использования.
- Тщательно вымойте руки перед тем как наполнить пакет или слить молоко из пакета.
- Фактическое количество молока может отличаться от отметок на пакете.
- Не замораживайте грудное молоко повторно и не добавляйте свежее грудное молоко в уже замороженное.
- Пакет можно хранить в холодильнике в течение 48 часов (не на боковой дверце) или в морозильной камере до 3 месяцев.

КАК НАПОЛНИТЬ ПАКЕТ

1. Откройте пакет, сняв защитную пломбу в верхней части пакета.
2. Чтобы открыть пакет, поместите пальцы в пространство над застежкой и аккуратно раздвиньте стенки пакета.
3. Не дуйте в пакет при раскрытии.
4. Налейте сцеженное молоко в пакет.
5. Не наполняйте пакет выше отметки 180 мл, так как во время заморозки молоко расширяется.
6. Аккуратно уберите излишки воздуха, нажав на верхнюю часть пакета.
7. Закройте пакет с помощью герметичной застежки.
Маркером напишите дату сцеживания и другую информацию.

КАК НАЛИТЬ МОЛОКО ИЗ ПАКЕТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

1. Чтобы открыть пакет, поместите пальцы в пространство над застежкой и раздвиньте стенки пакета.
2. Держа пакет за застежку, налейте молоко в контейнер.
3. Чтобы облегчить процесс, слегка прижмите застежку.
4. Для вашего удобства рекомендуем использовать съемную воронку для сцеживания при переливании молока из пакета в бутылочку.
5. Перед использованием молока пакет необходимо встряхнуть, так как молоко может распределяться неравномерно.

В ДОРОГЕ вы можете хранить молоко в изотермической сумке-холодильнике, снабженной пакетами со льдом (при температуре от -15 до 4 °C) до 24 часов.

 **Убедитесь, что молоко не попадает в область застежки-молнии, чтобы избежать возможного протекания.**



Гарантия 3 МЕСЯЦА